

Especificações

Este equipamento é produzido artesanalmente com segmento de luz interna e contagem de movimentos nas laterais.

É utilizado na terapia EMDR - *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (**Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares**), para substituir a ação humana de movimentos.

- ✓ Barra de 75cm com 26 leds;
- ✓ Controle remoto com bateria;
- ✓ Velocidade regulável pelo controle remoto;
- ✓ O sistema registra a última velocidade aplicada;
- ✓ Alimentação bi-volt (110v ou 220v);
- ✓ Tripé com (Nível de inclinação da barra e Regulagem de altura);
- ✓ 6 meses de garantia.

Cor do produto: preta com leds verdes.

PSI Equipamentos

E-mail: psi.equipamentos@techbs.com.br

Fone/WhatsApp: (61) 98244-9013

www.equipamentospsi.com

Barra de Luz

Manual de Instruções



Primeiro passo

Monte o tripé e faça a regulagem na altura e nível de inclinação que desejar.



Esta bolsa é comercializada separadamente,
NÃO ACOMPANHA a Barra de Luz

Segundo passo

Ligue a fonte na tomada (110v ou 220v volts). Ligue a chave vermelha que se encontra atrás da barra. Observe se os dois leds centrais estão ligados.



Suporte e Garantia


A garantia deste produto são de 12 meses, porém, continuaremos dando manutenção após este prazo, caso for necessário.

Para suporte ou acionar a garantia, entre em contato através:

 psi.equipamentos@techbs.com.br

  (61) 98244-9013

Como usar o controle

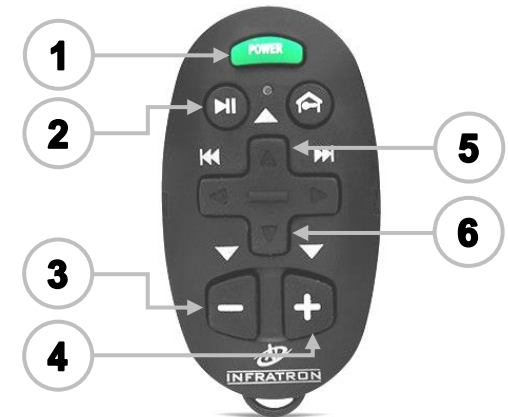

- 1 - Ligar a sequencia
- 2 - Pausar o movimento
- 3 - Diminuir a velocidade
- 4 - Aumentar a velocidade
- 5 - Acender todos os leds de forma sequencial *
- 6 - Acender apenas os leds das extremidades *

*As funções 5 e 6 só poderão ser acionadas quando a Barra de Luz estiver com a sequencia ligada, ou seja, após pressionar o botão 1, os movimentos poderão ser alternados entre o 5 e 6.