



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Equipamento Tátil




Barra de Luz



Equipamento Tátil

Este produto é produzido artesanalmente e tem por objetivo fazer os movimentos bilaterais táteis.

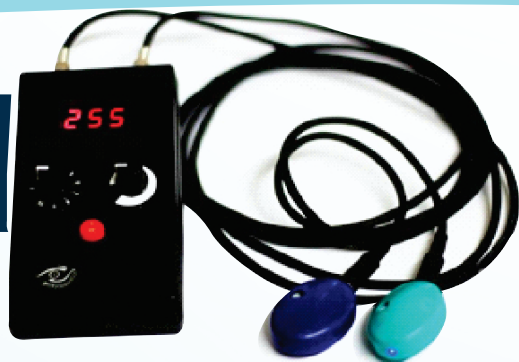

O aparelho possui 2 formas de alimentação de energia:

1ª pode ser ligado na tomada (110 ou 220 v).



2ª pode ser alimentada através de uma bateria 9v Alcalina. (A bateria não acompanha).

Modo de Uso:

O aparelho possui duas luzes de led's que mostram o movimento sendo feito nas pontas por meio de motores que vibram, chamados de "Pulses".

Modelo 1: A chave vermelha refere-se ao botão de LIGAR e DESLIGAR

Modelo 2: A chave de LIGAR e DESLIGAR é a mesma que aumenta e diminui a VELOCIDADE

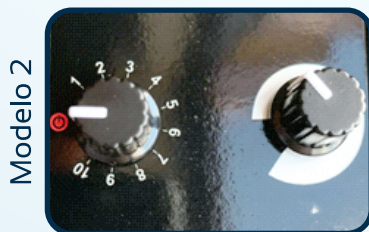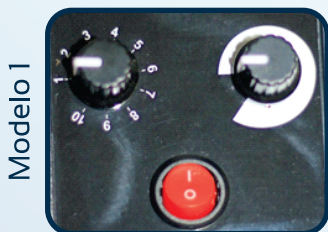

O botão giratório da esquerda refere-se à VELOCIDADE, podendo aumentar e diminuir de 1 a 10.

O botão giratório da direita refere-se a INTENSIDADE do movimento, podendo aumentar e diminuir.

O cabo é emborrachado aumentando a resistência, porém, o mesmo deve ser utilizado sem que haja torsão, caso contrário, corre o risco de danificar o cabo.

O display digital mostra a quantidade de movimentos aplicados.

Os Pulses são produzidos apenas para esta finalidade, por isso, são anatomicamente confortáveis e possuem as cores (azul, rosa, verde, salmão e roxo).



O produto é composto por:

- Caixa de comando com regulagem de intensidade, regulagem de velocidade, botão de ligar/desligar e display digital.
- Dois Pulses, podendo ser nas cores (azul, rosa, verde, salmão e roxo) com cabo preto de aproximadamente 1,50 metros.
- Fonte (110v/220v);
- Bolsa para o equipamento.



Recomendações:

Ao montar ou desmontar o equipamento, certifique-se que o mesmo esteja totalmente desligado, tanto da tomada quanto o botão Liga/Desliga.



Barra de Luz

Este equipamento é produzido artesanalmente com segmento de luz interna e contagem de movimentos nas laterais.

É utilizado na terapia EMDR - *Eye Movement Desensitization and Reprocessing* (**Dessensibilização e Reprocessamento por Movimentos Oculares**), para substituir a ação humana de movimentos.

Modo de Uso:

Primeiro Passo: Monte o tripé e faça a regulação na altura e nível de inclinação que desejar.



Esta bolsa é comercializada separadamente,
NÃO ACOMPANHA a Barra de Luz.


Segundo Passo: Ligue a fonte na tomada (110v ou 220v volts). Ligue a chave vermelha que se encontra atrás da barra. Observe se os dois leds centrais estão ligados.



Como usar o controle

- 1 - Ligar a sequencia;
- 2 - Pausar o movimento;
- 3 - Diminuir a velocidade;
- 4 - Aumentar a velocidade;
- 5 - Acender todos os leds de forma sequencial *;
- 6 - Acender apenas os leds das extremidades*;

*As funções 5 e 6 só poderão ser acionadas quando a Barra de Luz estiver com a sequência ligada, ou seja, após pressionar o botão 1. Os movimentos poderão ser alternados entre o 5 e 6.

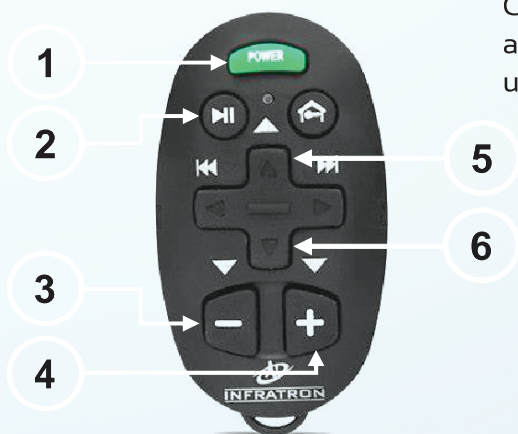

Caso o controle remoto começar a apresentar falhas, substituir a bateria por uma do mesmo modelo 2032.

O produto é composto por:

- Barra de 75cm com 26 leds;
- Controle remoto com bateria;
- Velocidade regulável pelo controle remoto;
- O sistema registra a última velocidade aplicada;
- Alimentação bi-volt (110v ou 220v);
- Tripé com (Nível de inclinação da barra e Regulagem de altura);
- **Cor do produto:** preta com leds verdes.

Garantia

Os produtos da Equipamentos PSI têm garantia de 1 ano, contados a partir da data de venda do produto.

A garantia é válida para defeitos de fabricação detectados após o recebimento do produto.

A Equipamentos PSI reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos em seus produtos a qualquer momento, sem incidir na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.

Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Equipamentos PSI poderá optar pelo conserto da peça, substituição do produto com defeito por um novo produto ou por créditos (vantagens) para serem usados na própria loja Equipamentos PSI.

A garantia dos produtos Equipamentos PSI não contempla as seguintes situações:

- Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não-previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
- Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
- Problemas causados por adaptações ou alterações realizadas no produto;
- Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor e não pela empresa;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;

A Equipamentos PSI reserva-se o direito de atender à todas as reposições no prazo máximo de 30 dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Suporte


Para suporte ou acionar a garantia, entre em contato através:

 **(61) 99132-8854**

 **suporte@equipamentospsi.com**

Ao entrar em contato, nos relate o problema que está acontecendo e se possível nos envie um vídeo demonstrando a dificuldade/problema.

Nosso suporte está disponível de segunda a sexta das 9:00 às 18:00, horário de Brasília.

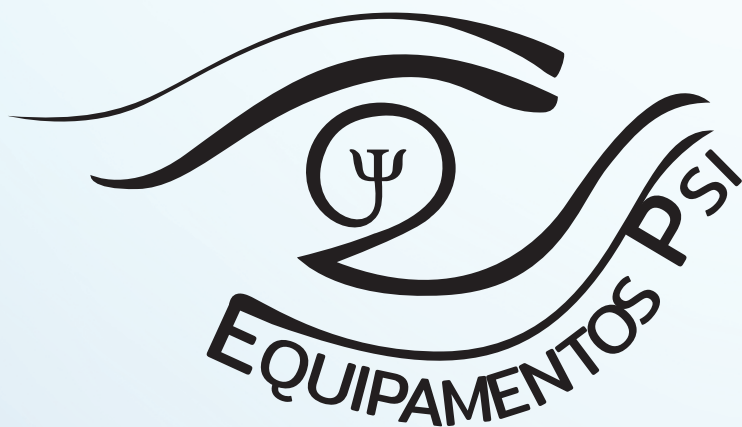

📞 (61) 98244-9013

✉ comercial@equipamentopsi.com

🌐 www.equipamentopsi.com